

Ходунки Dayang Medical

Dayang Medical XS305
E-0002

Dayang Medical XR204
E-0201 (роллеры) на колесах

Dayang Medical XS303
E-0006 (шагающие)

Порядок перемещения при помощи шагающих ходунков



Основные технические данные*

Наименование	Артикул		
	E-0002	E-0006	E-0201
Макс. нагрузка (кг)	100	100	100
Регулируемая высота (см)	76-93,5	76-93,5	77,5-95
Ширина/ Глубина, (см)	60/46	52/46	60/51
Количество колес/диаметр (мм)	нет	нет	2 (спереди) /125
Шаг настройки по высоте (см)	2,5		
Ручки	PVC		
Материал/Вес, кг	Алюминий/2.2	Алюминий/2.5	Алюминий/2.6

*производитель оставляет за собой право незначительно изменять габаритные размеры и пределы регулировок.

Порядок сборки-разборки

Освободить изделие от упаковки. Для приведения ходунков в рабочее состояние необходимо развернуть до упора поочередно боковые стойки: левую – влево, а правую – вправо; при этом центральная кнопка складного устройства зафиксировывает жесткость конструкции. Для складывания ходунков нажмите центральную кнопку складного устройства до полного утапливания в трубке. После этого боковые стойки следует поочередно сложить в любой последовательности.

Рекомендации по применению

Ходунки предназначены для оказания помощи при ходьбе людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности. По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость за счет более

широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости. Ходунки имеют регулировку по высоте, удобны при передвижении по квартире и на улице. Для регулирования высоты ходунка необходимо нажать кнопку регулировки высоты, установить ножку на требуемую длину и зафиксировать кнопку в новом отверстии.

Ходунки изготавливаются из алюминия, имеют накладные ручки из полимерных материалов. Будьте осторожны! Ходунки небезопасны при подъеме и спуске по лестнице.

Кроме того, они громоздки и неудобны для использования в ограниченном пространстве, могут застревать в дверных проемах. **ВНИМАНИЕ:** При использовании ходунков следует помнить о том, что:

- для максимальной устойчивости ходунки нужно поднять и затем опустить на все четыре ножки;
- необходимо поддерживать правильную осанку и положение тела;
- не подходить слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению.

Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

Импортер/Продавец: ООО «ПРОМЕТ», Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. Х, пом. 3Н, офис 70, принятие претензий по тел. +7 (812) 740-70-68, www.atletika.ru, sekretar@atletika.ru

Разрешительные документы:

- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717 от 8 сентября 2016 года

Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок от даты продажи при соблюдении правил эксплуатации: 12 мес.



Гарантийный талон

Вид изделия

Дата продажи

Фирма-продавец

Подпись продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно,
претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя

М.П.
торгующей
организации